

# schülke -†



Gebrauchsfertige, mit alkoholischer Wirkstofflösung getränkte Desinfektionstücher.

Jetzt auch im Softpack!

## mikrozid® AF wipes

### Unser Plus:

- gebrauchsfertige, getränkte Desinfektionstücher
- sehr breit wirksam innerhalb kürzester Zeit
- aldehydfrei
- schnelle Abtrocknung
- jetzt auch in *Premium*-Qualität im Softpack!

### Anwendungsgebiete

Alkoholische Schnelldesinfektion für Medizinprodukte [CE 0297] in allen Bereichen und Flächen aller Art mit erhöhtem Infektionsrisiko und dem Erfordernis kurzer Einwirkzeiten, wie z. B.:

- Patientenbehandlungseinheiten
- Untersuchungsliegen
- OP-Tische mit angrenzenden Arbeitsflächen
- Oberflächen medizinischer Geräte

### Anwendungshinweise

Flächen mit getränktem Tuch gründlich wischen, auf vollständige Benetzung achten und einwirken lassen. Zur Anwendung auf größeren Flächen ggf. mehrere Tücher verwenden.

### Mikrobiologische Wirksamkeit

mikrozid® AF wipes wirken gegen:

- Bakterien (inkl. Tb) • Pilze • Hepatitis-B-Viren • HIV • HCV
- Adenoviren • Noroviren • Rotaviren • Papovaviren
- Polioviren • Vacciniaviren

### Einwirkzeiten

Wirksamkeiten	Einwirkzeit
Bakterien, Pilze (gemäß DGHM-Richtlinien bei verkürzten Einwirkzeiten)	1 Min.
MRSA Methicillin-resistente Staphylococcus aureus-Stämme	1 Min.
Tb	1 Min.
viruzid*	30 Min.
begrenzt viruzid* (inkl. HIV, HBV und HCV)	30 Sek.
Adenoviren (Typ 2)	2 Min.
BVDV	30 Sek.
Norovirus**	1 Min.
Papova SV 40	15 Min.
Polioviren	30 Min.
Rotaviren	30 Sek.
Vacciniavirus	30 Sek.
DGHM-Liste/Zertifikat Flächendesinfektion in Krankenhaus und Praxis	5 Min.
ÖGHMP-Expertise Nr. 95/8	1 Min.

\* gemäß RKI-Empfehlung, Bundesgesundheitsblatt 01/2004

\*\* getestet in Anlehnung an EN 14 476; Prüfvirus: Murines Norovirus

# mikrozyd® AF wipes

## Produkt Daten

Zusammensetzung:

100 g Wirkstofflösung enthalten an wirksamen Bestandteilen:  
25 g Ethanol (94 %ig), 35 g Propan-1-ol

### Chemisch-physikalische Daten der Wirkstofflösung

Aussehen: klare, farblose Flüssigkeit  
Dichte (20 °C): ca. 0,90 g/cm<sup>3</sup>  
Flammpunkt: 27 °C (DIN 51 755)

## Kennzeichnung gemäß EG-Richtlinien

**Xi:** Reizend  
**R10:** Entzündlich  
**R36:** Reizt die Augen.  
**S2:** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

## Besondere Hinweise

**Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.**

Das Tragen von Schutzhandschuhen (z. B. aus Nitrilkauschuk) wird empfohlen.

Alkoholempfindliche Flächen (wie z. B. Acrylglas) dürfen nicht behandelt werden.

## Lieferformen / Verpackungseinheiten

Gebindegrößen	Verpackungseinheiten	Art. Nr.
mikrozyd® AF wipes	150 Tücher-Spenderdose	10 Dosen
	150 Tücher-Nachfüllbeutel	20 Beutel
		109 144

Gebindegrößen	Verpackungseinheiten	Art. Nr.
mikrozyd® AF wipes premium	24 Tücher-Softpack	14 Packungen
	48 Tücher-Softpack	18 Packungen
		119 104

## Zubehör

	Art. Nr.
Wandhalter kodan® / mikrozyd® Dose	134 417

## Umweltinformationen

schulke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

## Gutachten und Information

Einen Überblick aller zum Präparat mikrozyd® AF wipes vorliegenden Gutachten/Literatur finden Sie im Internet unter [www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)

Für Ihre individuellen Fragen:  
Customer Care

Telefon: +49 (0)40 521 00-666  
E-Mail: [info@schuelke.com](mailto:info@schuelke.com)

## Die Vorteile der mikrozyd® AF wipes premium

- handliches Softpack Format
- hochwertige premium Tuchqualität
- extra weich
- hohe Reichweite



BAUA: N-40580 (PT2)



Schülke & Mayr GmbH ist zertifiziert gemäß DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 und DIN EN ISO 13485 (Reg.-Nr. 004567-MP23) und verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem gem. Öko-Audit-Verordnung (Reg.-Nr. D-150-00003).

Schülke & Mayr GmbH  
22840 Norderstedt, Germany  
Telefon +49 (0) 40 - 521 00 - 0  
Telefax +49 (0) 40 - 521 00 - 318  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)  
[mail@schuelke.com](mailto:mail@schuelke.com)

Schülke & Mayr AG  
Sihlfeldstrasse 58  
8003 Zürich, Schweiz  
Telefon +41 (0) 44 - 466 55 44  
Telefax +41 (0) 44 - 466 55 33  
[mail.ch@schuelke.com](mailto:mail.ch@schuelke.com)

Schülke & Mayr Ges.m.b.H  
Seidengasse 9  
1070 Wien, Österreich  
Telefon +43 (0) 1 - 523 25 01-0  
Telefax +43 (0) 1 - 523 25 01-60  
[office.austria@schuelke.com](mailto:office.austria@schuelke.com)